

Cómo cuidar su herida después del tratamiento con el adhesivo tópico para piel DERMABOND*

El adhesivo tópico para piel **DERMABOND*** (2-octil cianoacrilato) es un adhesivo estéril, líquido, que mantiene unidos los bordes de la herida. La película adhesiva se mantiene en su lugar durante un período de 5 a 10 días y después, se desprende naturalmente de la piel.

La siguiente información responderá algunas de sus preguntas y le proporcionará instrucciones para el cuidado apropiado de su herida mientras está cicatrizando:

EXAMINE LA APARIENCIA DE LA HERIDA

- Algo de inflamación, enrojecimiento y dolor son comunes en todas las heridas y normalmente desaparecen a medida que la herida cicatriza. Si la inflamación, enrojecimiento y dolor aumentan o si siente calor en la herida, consulte a un médico. También debe consultar a un médico si los bordes de la herida se separan.

VENDAJE

- Si la herida está vendada, mantenga el vendaje seco.
- Cambie el vendaje diariamente hasta que la película adhesiva se caiga o si la venda se moja, a menos que su médico indique lo contrario.
- No rasque, talle ni toque la película adhesiva **DERMABOND**. De hacerlo, podría desprender la película antes de que la herida cicatrice.



- No ponga tiras adhesivas directamente sobre la película adhesiva **DERMABOND**, porque al quitarlas podría quitar la película.
- Proteja la herida de la exposición prolongada al sol o a lámparas bronceadoras mientras la película adhesiva esté sobre la herida.

MEDICACIONES TÓPICAS

- No aplique medicamentos líquidos, pomadas, ni cualquier otro producto a la herida mientras tenga la película adhesiva **DERMABOND**. Esto podría desprender la película antes de que la herida cicatrize.

CONSERVE LA HERIDA SECA Y PROTEGIDA

- Proteja la herida de lesiones repetidas hasta que la piel haya tenido tiempo suficiente para sanar.
- Ocasionalmente la herida podría mojarse brevemente en la ducha o en el baño. No remoje ni talle la herida, no nade y evite transpirar intensamente hasta que el adhesivo **DERMABOND** se calga naturalmente. Después de la ducha o el baño, seque cuidadosamente la herida con una toalla suave. Si utiliza una gasa protectora, aplique una nueva y seca, impidiendo que la parte adhesiva toque la película adhesiva **DERMABOND**.
- Aplique un vendaje limpio y seco sobre la herida si fuera necesario para protegerla.

Si tiene alguna duda o inquietud acerca de este producto, favor de consultar a su médico.

DERMABOND*
ADHESIVO TOPICO PARA PIEL
2-Octil Cianocrilato